

## Produkta īpašības

- Sievietes veselībai draudzīgs, ergonomisks produkts, ko var izmantot jebkurā sev vēlamā pozā
- Ideāla ierīce intensīvai maksts higiēnai, lai izsargātos no infekcijas un diskomforta sajūtas
- Tā kā atveres atrodas gan aplikatora galā, gan sānos, tad strūklas skalo ar optimālu efektu
- Speciālas membrānas pasargā no šķidruma atplūdes atpakaļ. Tās pasargā arī no pārmērīga strūklas spiediena.
- Gludais, lokanais aplikators, kombinācijā ar saspiežamā baloniņa ieliekto galu, nodrošina optimālu lietotājas komfortu
- Ideāls lietošanai kopā ar Multi-Gyn tabletiem, bet var lietot arī citiem skalošanas līdzekļiem

## Uzbūve

Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai ir Eiropā reģistrēta, unikāla ergonomiska konstrukcijas 1. klases medicīniskā ierīce.

Šīs ierīces sastāvā ir praktisks, saspiežams baloniņš ar elastīgu ieliektu kakliņu. Lokanais, gludais aplikators ar iebūvēto silikona ventili ir uzskrūvējams baloniņam. Tas ir viegli saspiežams ar vienu roku. Pateicoties speciālam silikona ventilim, šķidrums var plūst tikai vienā virzienā un nevar no maksts ieplūst atpakaļ pudelē. Pie tam, spiediens makstī nepieaug, tādēļ lietošana ir absolūti droša.

## Lietošana

- Vispārējai maksts higiēnai.
- Intensīvai maksts higiēnai niezes, dedzināšanas, kairinājuma, pastiprinātu, nepatīkamas krāsas vai smakas izdalījumu gadījumā,
- Maksts infekciju profilaksei, kā arī sēnišu (rauga sēnišu) izraisītu slimību vai bakteriālu infekciju ārstēšanā.

Piemērota higiēna ir ļoti nozīmīga maksts veselībai, īpaši menstruāciju, seksuālu aktivitāšu laikā, infekciju

arī dzemdes kakls no sūnu materiāla un izdalījumu atlikumiem. Vaginālu infekciju gadījumā kaitīgie mikroorganismi tiek izskalojami arī kopā ar sūnu paliekām.

Multi-Gyn baloniņš maksts skalošanai ir 1. klases medicīniskā ierīce vaginālu infekciju (bakteriālas vai sēnišu) profilaksei, kā arī palīg līdzeklis šo infekciju ārstēšanā.

vai diskomforta sajūtas gadījumā. Ar skalošanu tiek attīrīts maksts sienas krokas pie dzemdes kakla, kā

## Lietošanas biežums

Skalošanas biežums ir atkarīgs no individuālām īpatnībām (dažas sievietes ir uzņēmīgākas pret infekcijām kā citas), dzīvesveida, seksuālās (īpaši jau neaizsargātas) aktivitātes, menstruācijām utt.

Maksts higiēnai parasti ir pietiekami, ja skalošanu veic 1 reizi nedēļā.

Īpašos gadījumos, piemēram, menstruāciju laikā vai vagināla diskomforta novēršanai, skalo 3 reizes nedēļā (katru otro dienu).

Vaginālu problēmu gadījumā, kā palīg līdzekli vaginālu infekciju ārstēšanā ieteicams skalošanu veikt 2 reizes dienā 5 dienas.

Ja sūdzības nemazinās, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

## Maksts skalošana ar Multi-Gyn ierīci un grūtniecība.

Multi-Gyn baloniņu maksts skalošanai droši var lietot grūtniecības laikā. Pateicoties unikālajai konstrukcijai, nepieaug spiediens makstī, kas ir ļoti svarīgi no drošības viedokļa.


Grūtniecības plānošanas laikā ieteicams skalošanu veikt vismaz vienu dienu pēc dzimumakta.

Maksts skalošanu nevar izmantot kā kontracepcijas līdzekli.

## Lietošanas veids;

Maksts skalošanu var veikt dažādās pozās; sēžot uz WC, guļot vannā vai stāvot zem dušas. Svarīgi, lai skalojamais šķidrums varētu brīvi izplūst arī skalošanas laikā.

1. Izvēlieties sev ērtāko pozu skalošanai. Piepildiet baloniņu līdz malām ar remdenu ūdeni.
2. Sasmaļciniet Multi-Gyn Tableti un iebīriet baloniņā.
3. Uzskrūvējiet baloniņam aplikatoru un pagaidiet līdz tablete ir pilnībā izšķīdusi un beidz putot.
4. Maigi ievadiet aplikatoru makstī, izmantojot sev ērtāko pozu. Pārļiecinieties, ka skalojamais šķidrums var brīvi iztect.
5. Viegli saspiediet baloniņu 1 reizi un piepildiet makstī ar skalojamo šķidrumu. Baloniņu nav jāiztukšo pilnībā.
6. Izskalojiet baloniņu un aplikatoru ar siltu ūdeni.

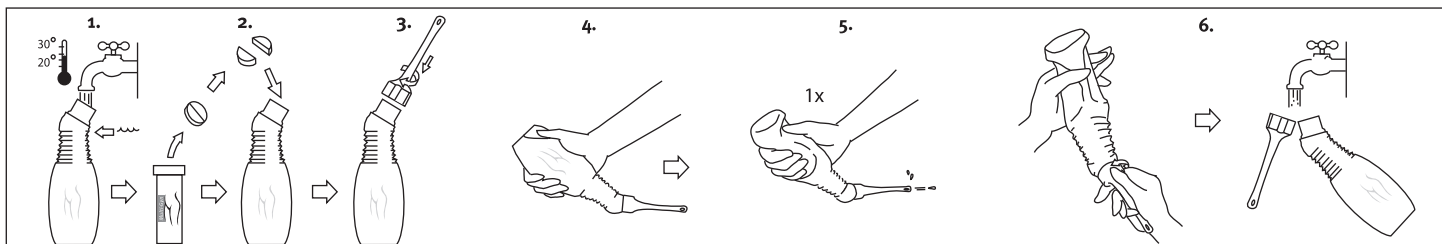

WWW.MULTI-GYN.COM

CE 06-2012  
BC1301.5

# Multi-Gyn® TABLETID

## Produkta īpašības

- Devas: 1 tablete paredzēta skalošanas šķidruma pagatavošanai 1 reizei, izmantojot Multi-Gyn baloniņu maksts skalošanai
- Dabīgas sastāvdaļas, nesatur konservantus un aromatizētājus
- Veicina pienskābo baktēriju augšanu un veido makstī dabīgu, optimālu vidi
- Iepakojums ir neliels, ērts un neuzkrītošs
- Drošs lietošanai, bez nelabvēlīgiem blakusefektiem

Multi-Gyn baloniņa maksts skalošanai lietošana kopā ar šķīstošajām tabletēm piedāvā optimālu intīmo higiēnu, kas var pasargāt no vaginālām infekcijām un tādām nepatīkamām sajūtām kā niezēšana, kairinājums, dedzināšana, un pārmērīgi izdalījumi, nepatīkams aromāts.

## Droša skalošana ar dabiskām vielām

Šo koncentrēto šķīstošo tablešu sastāvā ir dabiskas sastāvdaļas, tās nesatur konservantus. Koncentrētu, šķidru skalošanas līdzekļu sastāvā parasti ir konservanti. Tie kaitīgi ietekmē labvēlīgo baktēriju augšanu un dabiskos apstākļus makstī. Izmantojot Multi-Gyn tabletes, var pagatavot skalojamo šķidrumu, kas ir drošs lietošanai un efektīvi tīra makstī. Multi-Gyn tabletes satur sastāvdaļas, kas veicina pienskābo baktēriju augšanu un alvejas ekstraktu, kas nodrošina maksts audiem optimālus apstākļus.

Multi-Gyn tabletes vislabāk lietot, izmantojot Multi-Gyn baloniņu maksts skalošanai (1. klases medicīniskā ierīce), optimālai intīmai higiēnai, vaginālu infekciju (gan sēnišu, gan bakteriālu) profilaksei un ārstēšanā.

## Sastāvdaļas

Nātrija bikarbonāts, Citronskābe, Aloe Barbadensis (alvejas pulveris), askorbīnskābe, laktoze.

## Grūtniecība un zīdīšanas periods

Skalojamo šķidrumu, kas pagatavots no Multi-Gyn Tabletēm, droši var lietot grūtniecības un zīdīšanas periodā.

## Indikācijas

- Vispārējai maksts higiēnai.
- Pārmērīgu, nepatīkamu aromāta vai krāsas izdalījumu, niezes, kairinājuma vai dedzināšanas mazināšanai.
- Vaginālu infekciju profilaksei un kā palīg līdzekli sēnišu un bakteriālu infekciju ārstēšanā.

## Lietošana

Maksts skalošanai, izmantojot Multi-Gyn baloniņu. Vienu Multi-Gyn tableti izšķīdiniet baloniņā, kas piepildīts ar remdenu ūdeni. Baloniņam uzskrūvējiet aplikatoru un ievadiet to makstī. Saspiežot baloniņu, šķidrums maigi un efektīvi izskalo makstī. Ja simptomi nemazinās, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

## Iedarbība

- Palīdz novērst nepatīkamu aromātu un normalizēt izdalījumu daudzumu
- Palīdz novērst vaginālas problēmas un veicina kā sēnišu, tā bakteriālu infekciju ārstēšanu
- Veicina pienskābo baktēriju augšanu un nodrošina dabiskus apstākļus makstī

## Blaknes

Multi-Gyn Tabletēm nav kaitīgu blakusefektu.

Produkts nesatur hormonus, konservantus, aromatizētājus vai toksiskas vielas.

Tootija: BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Holland  
Tālrunis: BetaMed OÜ, Ringtee 43, 50105 Tartu. info@betamed.ee

WWW.MULTI-GYN.COM

CE 06-2012  
BC1301.5