

Multi-Gyn® FloraPlus Priešgrybelinis makšties gelis su prebiotikais

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite informacinį lapelį.

„Multi-Gyn FloraPlus“ - Gydo mielinį grybelį bei padeda jo išvengti:

- Gydo mielinį grybelį bei padeda jo išvengti.
- Prebiotikai skatina gerųjų pieno rūgšties bakterijų (*Lactobacillus*) augimą.
- Numalšina perštėjimą, sudirginimą.
- Sumažina nemalonų kvapą ir gausias išskyras.
- Apsaugo nuo (pasikartojančio) mielinio grybelio.
- Prebiotikai palaiko optimalią makšties mikrofloros pusiausvyrą.
- Neišsivysto patogeninių mikroorganizmų atsparumas preparatui.
- Palaiko optimalų makšties terpės rūgštingumą (pH).
- Bioaktyvus, saugus ir natūralus.

„Multi-Gyn FloraPlus“ savybės

„Multi-Gyn FloraPlus“ yra natūralus produktas. Jo pagrindas yra patentuotas biologiškai aktyvus 2QR* kompleksas su prebiotikais. Prebiotikai, esantys „Multi-Gyn FloraPlus“ sudėtyje, yra maistinė gerųjų pieno rūgšties bakterijų (*Lactobacillus*) medžiaga, skatinanti jų augimą. „Multi-Gyn FloraPlus“ sudėtyje, esantys prebiotikai, tai vitaminų, amino rūgščių ir monosacharidų derinys.

„Multi-Gyn FloraPlus“ palaiko optimalią makšties mikrofloros pusiausvyrą ir makšties terpės rūgštingumą (pH). 2QR* kompleksas – tai natūralūs biologiškai aktyvūs polisacharidai, gauti iš alavijo. „Multi-Gyn FloraPlus“ turi unikalią savybę: blokuoja patogeninių bakterijų prisitvirtinimą ir efektyviai jas neutralizuoja. Toks natūralus blokuojantis ir prebiotinis poveikis yra visiškai saugus ir nekenksmingas, kadangi sudėtyje nėra toksinių ar agresyvių cheminių medžiagų. Šalutinio poveikio reiškinių iki šiol nėra žinoma. Neišsivysto patogeninių mikroorganizmų atsparumas preparatui. Dėka unikalios derinio, „Multi-Gyn FloraPlus“ yra puikus produktas, apsaugantis nuo makšties negalavimų.

„Multi-Gyn FloraPlus“ palaiko makšties mikrofloros pusiausvyrą: blokuoja patogenines bakterijas ir skatina gerųjų pieno rūgšties bakterijų (*Lactobacillus*) augimą. „Multi-Gyn FloraPlus“ sukuria optimalią ir natūralią makšties mikroflorą, apsaugančią nuo makšties negalavimų, kuriuos sukelia patogeninių mikroorganizmų dauginimasis, pvz., *Candida*. Tokiu būdu, „Multi-Gyn FloraPlus“ yra labai veiksminga priemonė, užkertanti kelią makšties (pasikartojantiems) negalavimams, t.y. sumažina gausias išskyras, numalšina perštėjimą, sudirginimą, paraudimą ir jautrumą.

„Multi-Gyn FloraPlus“ registruotas kaip Medicinos prietaisas, II a klasė.

Indikacijos

- Po mėnesinių ir po lytinių santykių (be apsisaugojimo priemonių).
- Gydantis antibiotikais ar po jų vartojimo.
- Jei dažnai plaukiojate baseine ar vandens telkiniuose.
- Atostogaujant.
- Jei skundžiatės makšties negalavimais: perštėjimu, sudirginimu, nemalonių kvapų ir gausiomis išskyromis.
- Jei esate jautri makšties mielinio grybelio infekcijoms, „Multi-Gyn FloraPlus“ Jums idealiai tinka, kadangi jis efektyviai apsaugo nuo mielinio grybelio bei stabdo jo augimą.
- ...esant nežymiems makšties negalavimams.

Kada naudoti „Multi-Gyn FloraPlus“

Mielinio grybelio gydymui

Tūbelės turinį (vienkartinę dozę) išspauskite į makštį, 5 dienas iš eilės. Rekomenduojama makštį tepti prieš miegą.

Esant makšties negalavimams, pvz., perštėjimui, sudirginimui, nemaloniam kvapui ir gausioms išskyroms

Panaudokite vienkartinę dozę bet kuriuo metu, kai norite sumažinti nemalonus pojūčius.

Norint apsisaugoti nuo makšties negalavimų (pvz., pasikartojančio mielinio grybelio)

Pakanka vienkartinės „Multi-Gyn FloraPlus“ dozės kartą per 3 dienas, kad paskatinti gerųjų pieno rūgšties bakterijų (*Lactobacillus*) augimą ir išvengti makšties negalavimų.

Prašome atkreipti dėmesį! „Multi-Gyn FloraPlus“ nėra priešgrybelinis vaistas.

Esant nuolatiniams arba pasikartojantiems nusiskundimams, visada turėtumėte pasikonsultuoti su savo gydytoju ginekologu.

„Multi-Gyn FloraPlus“ neturėtų būti naudojamas ilgiau kaip 30 dienų (vienam gydymo kursui).

„Multi-Gyn FloraPlus“ sudėtis

„Multi-Gyn FloraPlus“ yra natūralus produktas. Jo pagrindas yra patentuotas biologiškai aktyvus 2QR* kompleksas su prebiotikais, t.y. amino rūgštimis ir vitaminais. Unikalioje „Multi-Gyn FloraPlus“ sudėtyje nėra: hormonų, gyvūninės kilmės produktų, kvapiųjų ir agresyvių cheminių medžiagų. Jis yra saugus ir nekenksmingas.

Veikliosios medžiagos: Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, monosacharidai, amino rūgštys, vitaminai.

* 2QR – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, kurie molekulinės filtracijos būdu, gaunami iš alavijų (*Aloe Barbadensis*) lapų gelio.

Padidėjęs jautrumas (alergija) „Multi-Gyn FloraPlus“ sudėtinėms preparato dalims yra labai reti. Jei Jūsų organizmas jautrus žoliniais preparatais, patariame užtepti nedidelį kiekį „Multi-Gyn FloraPlus“ ant dilbio vidinės pusės odos. Jei oda parausta ir peršti, galima daryti išvadą, kad Jūs esate alergiška vienai iš sudedamųjų „Multi-Gyn FloraPlus“ dalių. Tokiu atveju patariame nenaudoti „Multi-Gyn FloraPlus“.

Šalutinis poveikis

Kadangi „Multi-Gyn FloraPlus“ palaiko optimalų makšties terpės rūgštingumą, o sperma yra šarminė, naudojant „Multi-Gyn FloraPlus“ gali sumažėti spermos aktyvumas. Jei pageidaujate pastoti, nenaudokite „Multi-Gyn FloraPlus“ keletą valandų po lytinių santykių. „Multi-Gyn FloraPlus“ – nėra kontraceptikas. Kitų šalutinio poveikio reiškinių iki šiol nėra žinoma.

Sąveika su vaistais

„Multi-Gyn FloraPlus“ neturi sąveikos su vaistais.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

„Multi-Gyn FloraPlus“ galima naudoti nėštumo metu ir maitinant kūdikį krūtimi.

Laikymo sąlygos

Laikyti 10°C - 25°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Jei simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

Kaip naudoti „Multi-Gyn FloraPlus“

„Multi-Gyn FloraPlus“ - tai makšties gelis su prebiotikais, kuris išspaudžiamas į makštį. Kiekviena tūbelė atitinka vienkartinę dozę. Makšties gelis su prebiotikais tiesiogiai išspaudžiamas į makštį per specialios formos aplikatorių. Tūbelę po panaudojimo išmeskite.

Žemiau pateikta vienkartinių dozių naudojimo instrukcija su paveikslėliais.

Read this entire information leaflet carefully before each time you use Multi-Gyn FloraPlus and keep for reference.

1. Pakratykite tūbelės turinį link aplikatoriaus.
2. Pasukite dangtelį, esantį ant aplikatoriaus galo, kad jį nuimtumėte.
3. Į vieną ranką paimkite tūbelę ir atsargiai įveskite plonąjį (tūbelės) aplikatoriaus galą į makštį.
4. Lengvai paspauskite tūbelę, kad gelis patektų į makštį.
5. Ištraukite tūbelę, laikydamos ją suspausta, ir išmeskite.

Pastaba: Tūbelėje yra Jums reikalingas gelio kiekis.

Jei naudojama kaip nurodyta, nedidelis gelio kiekis liks tūbelėje.

3. 4. 5.

CE 0086 07-2010

BC180I.2

Gamintojas: BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, Nyderlandai, www.multi-gyn.com
Rinkodaros teisės turėtojo atstovas:

UAB "Biopartneris"

tel. 8 5 2074009

info@biopartner.lt